

Kontaktlinsevejledning til Proclear® 1 day multifocal

Forskellige kunder. Én enkel proces til valg af linser.

En unik metode gør det nemt at vælge linser.

- Centralt læseområde med asfærisk design.
- Udformet med enkeltstyrkeprofil.
 - Bevare afstandssynet, begrænser behovet for at gå på kompromis med synet.
- "Near boost" på det ikke-dominante øje.
 - Optimerer synet på kort og mellemlang afstand og bevare det binokulære syn.
 - Passer til brugere med en addition på op til +2,50.
- Giver sammenlagt en mere naturlig synsoplevelse.

Vejledning i valg af linser

Trin 1 Bekræft refraktionen, og fastlæg øjendominans.

Trin 2 **Dominant øje:** Vælg en linse med en passende afstandsrefraktion.

Ikke-dominant øje: Vælg en linse med det anbefalede "near boost" lagt til afstandsstyrken iht. kundens additionskrav:

Kundens addition	"Near boost"
op til +1,00	Ingen "near boost" er påkrævet
+1,25 til +1,75	+0,75 D
+2,00 til +2,50	0,75 D til +1,00 D

Eksempel på refraction: -2,00 OU med +1,75 addition

Proclear 1 day multifocal linsestyrke


Dominant øje	Ikke-dominant øje
-2,00	-1,25

Trin 3 Lad linsene sidde i et stykke tid, før synet kontrolleres. Hvis kunden er tilfreds med synet, kan kontaktlinserne udleveres.

Optimeringstips

For at forbedre afstandssynet udføres en overrefraktion i trin 1 a +/- 0,25 D på det dominante øje under binokulære forhold. Mange optikere oplever, at et tillæg på +0,25 D på det dominante øje i trin 2 forbedrer afstandssynet.

For at forbedre nærsynet udføres en overrefraktion i trin 1 a +/- 0,25 D på det ikke-dominante øje under binokulære forhold.

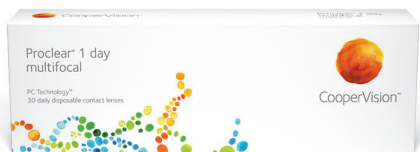

Én innovativ metode. Flere årsager til at vælge Proclear.

Forbedrer nærsynet uden at påvirke afstandssynet.

- Enkel tilpasning hos linsebrugere i takt med, at de gennemgår forskellige stadier af presbyopi.
 - Udformet med enkeltstyrkeprofil.
 - Mindsker behovet for at gå på kompromis med afstandssynet.
- Linsens udformning bidrager til en forenklet oplevelse ved linsetilpasning.
 - Mindsker tiden hos optikeren og minimerer antallet af opfølgingsbesøg.
- Bredt, effektivt parameterinterval.
- Ny metode til at opfylde synsbehovet hos brugere af endagslinser.

Forskellige kunder. Én Proclear.

Behandler hvert øje separat, samtidig med at det binokulære syn bevares

- Der anvendes forskellige styrker på det enkelte øje for at forbedre nærsynet, samtidig med at behovet for at gå på kompromis med afstandssynet minimeres.
- Der sendes separate signaler til hvert øje, hvilket giver hjernen mulighed for at danne et bedre billede.

En betydelig forbedring i forhold til monovision

- Bevarer den binokulære summation ved højere additioner og giver et bedre syn end monovision.
- Giver forbedret stereopsi, syn på mellemlang afstand og mørkesyn.
- Multifokalt linsedesign.

Produktspecifikationer

Proclear 1 day multifocal

Styrke	+6,00 til -10,00 (i trin a 0,25; trin a 0,50 efter -6,00)
Addition	Udformet med enkeltstyrkeprofil.
Basiskurve	8,7 mm
Diameter	14,2 mm

